

【医療用不織布でアイソレーションガウンを作る方法】

◎用意する物:180cm×150cmの不織布(大きさは各施設で工夫してください)、ガムテープ、はさみ

- 発案:榊原記念病院(東京・府中)
- ①半分に折る
- ②上から 25cm のところに横から切り込みを入れる (18cm)

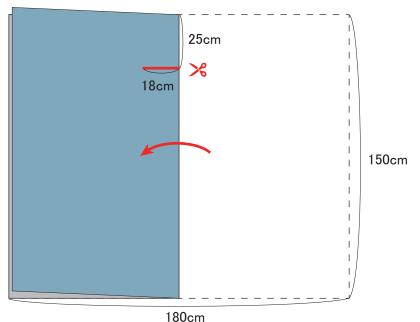

- ③広げて、切り込み部分を横に折る
- ④60cm ガムテープを貼り、袖を作る

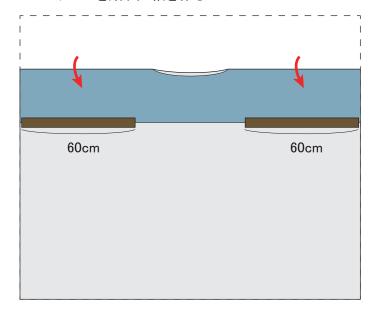

- ⑤ガムテープの下に 60cm 切り込みを入れる
- ⑥端から6~7cmのところ、縦に切れ込み(全部切らないで少し残す)

